



---

## Katalog

# Infuzja Chemioterapia

**Producent:** CAIR LGL

Zi Le Pontet  
69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)

Przedstawiciel w Polsce: **AKME** • Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
Tel.+48 (22) 853-50-69, 853-50-70, 853-50-72 • Fax.+48 (22) 853-50-71  
[akme@akme.com.pl](mailto:akme@akme.com.pl) • [www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

## DOSICAIR

### Regulatory przepływu

Regulatory przepływu DOSICAIR zostały zaprojektowane do regulowania prędkości w infuzjach grawitacyjnych. Zestawy DOSICAIR zwiększają regularność i dokładność ciągłej infuzji grawitacyjnej, zastępując pompy objętościowe.

### Jak działa DOSICAIR?

Regulator DOSICAIR ma cylindryczną budowę z naniesioną podziałką wyskalowaną w zakresie (5-250) ml/h (wersje z podwójną skalą posiadają dodatkową skalę (5-150) ml dla lipidów). Regulacja prędkości odbywa się poprzez odpowiednie wzajemne skręcenie górnej i dolnej części cylindra.

W zależności od nastawy, średnica układu regulującego przepływ zmienia się – umożliwiając przepływ płynu z żądaną prędkością.

Łącznik wykonany z medycznego silikonu jest w ciągłym kontakcie z płynem podawanym pacjentowi, utrzymując obydwie części cylindra w pełnej szczelności dla płynów.

Nr kat.	Opis	Szt./op.
<b>DF 050</b>	Regulator Dosiflow, bez portu bocznego, męski / żeński łącznik luer lock	50
<b>DF 060</b>	Regulator Dosiflow, podwójna skala, bez portu bocznego, męski / żeński łącznik luer lock	50
<b>DF 300</b>	Zestaw z komorą kroplową (20 kropel/ml) o długości 195 cm, z portem bocznym	50
<b>DF 360</b>	Zestaw z komorą kroplową (20 kropel/ml) o długości 195 cm, podwójna skala, z portem bocznym	50
<b>DF 352M</b>	Zestaw z komorą kroplową (20 kropel/ml) o długości 195 cm, bursztynowy, z portem bocznym	50
<b>DF 353KR</b>	Zestaw z komorą kroplową (20 kropel/ml) o długości 195 cm, z portem bocznym, z zaworem jednokierunkowym	50



# NeutraClear®

*Zamknięty system dostępu  
bezigłowego gwarantujący bezpieczne  
rozłączenie i przejrzystość w celu  
zapobiegania odcewnikowym  
infekcjom układu krwionośnego.*



**AKME**

Dystrybutor w Polsce: AKME  
Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
Tel.+48 (22) 853-50-69, -70, -72  
[www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

Producent: CAIR LGL  
Francja, Zi Le Pontet,  
69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)



## NeutraClear®

### DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

▶ Gwarantuje zachowanie najwyższych standardów

#### Łącznik bezigłowy

Wyklucza ryzyko:

- kontaktu z krwią (zgodnie z wytycznymi 2010/32/EU)
- zanieczyszczenia chemicznego

#### Całkowicie przejrzysty

- Gwarantuje najwyższe standardy w zakresie higieny
- Polecany przez ekspertów

#### Zalecenia

- dbaj o higienę rąk przed rozpoczęciem pracy z cewnikiem
- wybieraj optymalne miejsce dostępu do cewnika
- podczas zakładania cewnika starannie przestrzegaj reguł aseptyki
- dezynfekuj miejsca dostępne w cewniku
- usuwaj niewykorzystywane cewniki
- używaj całkowicie przezroczystego i bezpiecznego łącznika bezigłowego

### DLA PACJENTÓW

▶ Zapewnia bezpieczeństwo

#### Zamknięty system

Zapobiega:

- zatorom powietrznym
- zakażeniom bakteryjnym

#### Bezpieczne rozłączanie

Zaprojektowany tak, aby:


- zapobiegał refluksowi w cewniku
  - eliminacja ryzyka okluzji lub infekcji w cewniku
- posiadał gładkie powierzchnie
  - eliminacja ryzyka infekcji w łączniku

#### Gładka powierzchnia i prosty tor przepływu

- łatwe przepłukiwanie
- laminarny przepływ wewnątrz łącznika
- optymalny zakres prędkości przepływu

## Zakres zastosowań

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami płynów: lipidami, lekami stosowanymi w chemioterapii, itd.

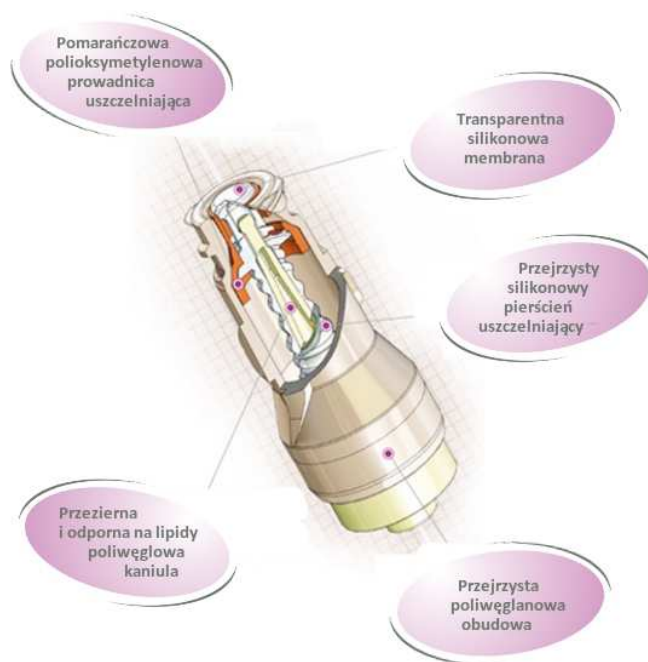

## Objętość refluksu

- 0,004 ml

NeutraClear® zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed ryzykiem powstania infekcji w cewniku, gdyż posiada jeden z najniższych poziomów refluksu wśród dostępnych na rynku łączników.

## Przestrzeń martwa

0,05 ml

Zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje podaż całej przygotowanej dawki.

## Długość i waga

2,7 cm — 1 g

NeutraClear® jest jednym z najmniejszych i najlżejszych łączników bezigłowych. Ma szczególne zastosowanie w neonatologii i pediatrii. Zapewnia komfort dziecku, a personelowi medycznemu łatwość obsługi.

## Zakres prędkości

350ml/mn max

Wartość przepływu odpowiednia zarówno dla podaży grawitacyjnej, jak również przy użyciu pompy infuzyjnej. Doskonale nadaje się dla neonatologii, pediatrii a także do bardzo szybkiej podaży płynów w ratownictwie.

## Ciśnienie wsteczne






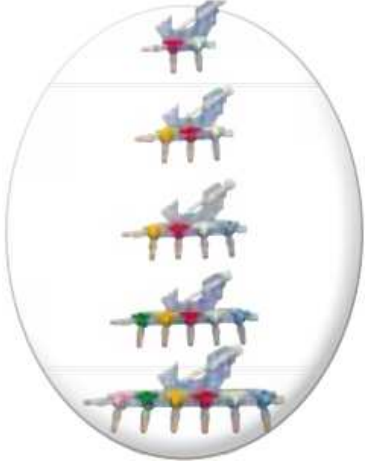







2,6 Bar

Zgodne z normą 8536-10.

## Ciśnienie aktywacji

7 Bar max

Łatwy w obsłudze, zapobiega ryzyku wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych.

	PRODUKT	NR KATALOGOWY	Ilość/op.
	Bezigłowy zawór dostępu dożylnego NeutraClear® (przezroczysty)	EL 200	200
	Łącznik NeutraClear z drenem 4cm (PE/PVC, Ø1mm), z zaciskiem i obrotowym łącznikiem Luer Lock	 PB11004NCM	40
	Łącznik NeutraClear z drenem 8cm (PE/PVC, Ø1mm), z zaciskiem i obrotowym łącznikiem Luer Lock	 PB11008NCM	40
	Łącznik NeutraClear z drenem 8cm (PE/PVC, Ø1,5mm), z zaciskiem i obrotowym łącznikiem Luer Lock	PB12005NCM	40
	Łącznik NeutraClear z drenem 13,5cm (PE/PVC, Ø1,5mm), z zaciskiem i obrotowym łącznikiem Luer Lock	PB1201NCM	40
	Kranik 3-drożny z zaworem NeutraClear®	RO301NCM	50
	Rampa 2-kranikowa z 3 łącznikami NeutraClear® i portem męskim	 RM2000NCA	20
	Rampa 3-kranikowa z 4 łącznikami NeutraClear® i portem męskim	 RM3000NCA	20
	Rampa 4-kranikowa z 5 łącznikami NeutraClear® i portem męskim	 RM4000NCA	15
	Rampa 5-kranikowa z 6 łącznikami NeutraClear® i portem męskim	RM5000NCA	15
	Rampa 6-kranikowa z 7 łącznikami NeutraClear® i portem męskim	RM6000NCA	15
	SpiderDrive, 2-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi NeutraClear®, dł.10cm, Ø1mm, z różnokolorowymi zaciskami ślizgowymi	 PY2101NCM	25
SpiderDrive, 3-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi NeutraClear®, dł.10cm, Ø1mm, z różnokolorowymi zaciskami ślizgowymi	 PY3101NCM	25	
SpiderDrive, 3-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi NeutraClear®, dł.10cm, Ø2,5mm, z różnokolorowymi zaciskami typu „C”	PY3301NCM	25	
	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym NeutraClear, z drenem 13,5cm, Ø1mm	 PE1101NCM	25
	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym NeutraClear, z drenem 13,5cm, Ø2,5mm	PE1301NCM	25
	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym NeutraClear, z drenem 25cm, Ø1mm	PE1302NCM	25



produkt odpowiedni również do zastosowań w pediatrii/neonatologii

Dwukierunkowy  
bezigłowy  
zawór dostępu  
dożylnego



*Cair-Drive*®

**AKME**

Dystrybutor w Polsce: AKME  
Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
Tel.+48 (22) 853-50-69, -70, -72  
[www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

Producent: CAIR LGL  
Francja, Zi Le Pontet,  
69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)



## Cair-Drive

### DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

▶ Gwarantuje zachowanie najwyższych standardów

### DLA PACJENTÓW

▶ Zapewnia bezpieczeństwo

#### Łącznik bezigłowy

Wyklucza ryzyko:

- kontaktu z krwią (zgodnie z wytycznymi 2010/32/EU)
- zanieczyszczenia chemicznego

#### Zamknięty system

Zapobiega:

- zatorom powietrznym
- zakażeniom bakteryjnym

#### Bezpieczne rozłączanie

Zaprojektowany tak, aby:

- zapobiegał refluksowi w cewniku
  - eliminacja ryzyka okluzji lub infekcji w cewniku
- posiadał gładkie powierzchnie
  - eliminacja ryzyka infekcji w łączniku

#### Gładka powierzchnia i prosty tor przepływu

- łatwe przepłukiwanie
- laminarny przepływ wewnątrz łącznika
- optymalny zakres prędkości przepływu

#### Zalecenia dotyczące dezynfekcji łączników bezigłowych

- **Odpowiednie materiały:**
  - sterylna gaza
  - 70% alkohol lub chlorheksydyna/alkohol

- **Dezynfekcja:**

- 1) Nasączyć sterylną gazę 70% alkoholem lub chlorheksydyną/alkoholem
- 2) Dezynfekować membranę przez 15 sekund poprzez pocieranie jej powierzchni




## Zakres zastosowań

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami płynów: lipidami, lekami stosowanymi w chemioterapii, itd.




### Pozycja spoczynkowa – układ jest zamknięty

Zawór w pozycji zamkniętej – brak możliwości przepływu płynów. Prowadnica uszczelniająca w pełni chroni port przed przedostaniem się wody lub powietrza

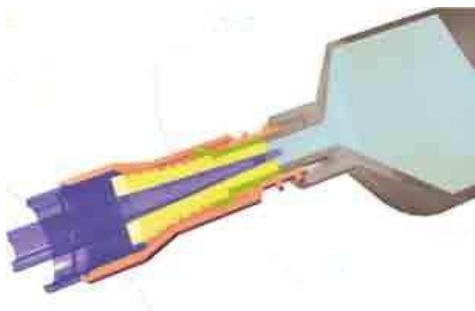


### Rozpoczęcie aktywacji – układ jest zamknięty

Zawór w pozycji przejściowej – silikonowa membrana zostaje wepchnięta przez łącznik męski Luer w strzykawkę. Pierścień gwarantuje aktywację z łącznikiem typu Luer. Strzykawka zostaje stabilnie zamocowana.

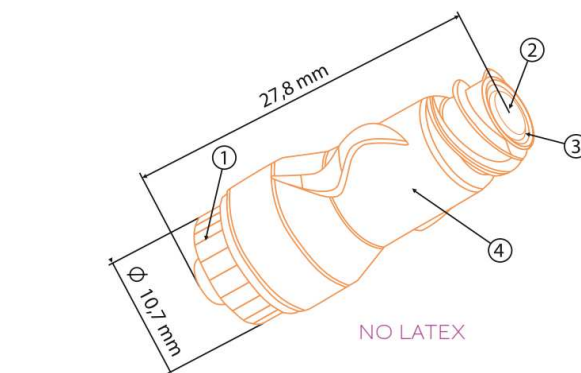

- 1 – Poliwęglanowa lipidoodporna kaniula do podaży płynów z męską końcówką LuerLock
- 2 – Silikonowa membrana
- 3 – Poliwęglanowi prowadnica uszczelniająca
- 4 – Poliwęglanowa obudowa

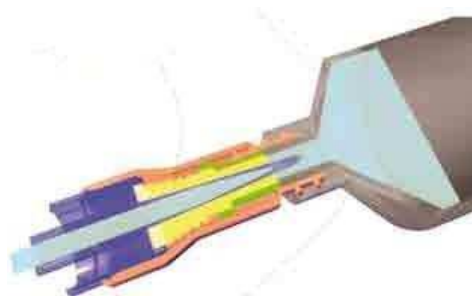

### Aktywacja: układ gotowy do podania lub pobrania próbki

Zawór w pozycji otwartej, silikonowa membrana zostaje maksymalnie cofnięta. Przestrzeń w męskim łączniku Luer pozostaje pusta. Połączenie między końcem męskiego łącznika Luer a silikonową membraną jest dokładnie uszczelnione – brak ryzyka wycieku płynu lub przedostania się powietrza.

Objętość refluksu

- 0,004 ml

Przestrzeń martwa

0,05 ml

Długość i waga

2,7 cm — 1 g

Zakres prędkości

350ml/mn max

Ciśnienie wsteczne

2,6 Bar

Ciśnienie aktywacji

7 Bar max

# AKME

Dystrybutor w Polsce: AKME  
 Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
 Tel.+48 (22) 853-50-69, -70, -72  
[www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

Producent: CAIR LGL  
 Francja, Zi Le Pontet,  
 69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)



## Port bezigłowy CairDrive

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
EL500	Port bezigłowy CairDrive	200

## Przedłużacz PE/PVC

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
PB1108DM	Przedłużacz PE/PVC, luer z obrotowym kołnierzem, m/ż, Ø wewn:1mm- Ø zewn:2.5mm, dł. 8cm	40
PB1201DM	Przedłużacz PE/PVC, luer z obrotowym kołnierzem, m/ż, Ø wewn:1.5mm- Ø zewn:3mm, dł. 13,5cm	40
PB12018DM	Przedłużacz PE/PVC, luer z obrotowym kołnierzem, m/ż, Ø wewn:1.5mm- Ø zewn:3mm, dł. 18cm	40

## Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
PE1101DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 13,5cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm	25
PE1102DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 25cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm	25
PE1105DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 50cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm	25
PE1107DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 75cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm	25
PE1110DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 100cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm	25
PE1120DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 200cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm	25
PE1301DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 13,5cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25
PE1302DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 25cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25
PE1305DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 50cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25
PE1307DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 75cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25
PE1310DM	Kranik 3-drożny, z portem bezigłowym CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 100cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25
PE2301DM	Kranik 3-drożny, z dwoma portami bezigłowymi CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 13,5cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25
PE2302DM	Kranik 3-drożny, z dwoma portami bezigłowymi CairDrive, z przedłużaczem PE/PCV: 25cm, Øwewn/zewn: 2,5 mm/4,1mm	25

## Kranik 3-drożny, lipidoodporny, z portem bezigłowym CairDrive

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RO301DM	Kranik 3-drożny, lipidoodporny, z portem bezigłowym CairDrive oraz obrotowym kołnierzem	50
RO302DM	Kranik 3-drożny, lipidoodporny, z dwoma portami bezigłowymi CairDrive oraz obrotowym kołnierzem	50

## SpiderDrive

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
PY2101DM	SpiderDrive, 2-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi CairDrive, dł.10cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm, z różnokolorowymi zaciskami ślizgowymi	25
PY2301DM	SpiderDrive, 2-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi CairDrive, dł.10cm, Øwewn/zewn: 2,5mm/4,1mm, z różnokolorowymi zaciskami "C"	25
PY3101DM	SpiderDrive, 3-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi CairDrive, dł.10cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm, z różnokolorowymi zaciskami ślizgowymi	25
PY3301DM	SpiderDrive, 3-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi CairDrive, dł.10cm, Øwewn/zewn: 2,5mm/4,1mm, z różnokolorowymi zaciskami ślizgowymi	25
PY4101DM	SpiderDrive, 4-odprowadzenia z łącznikami bezigłowymi CairDrive, dł.10cm, Øwewn/zewn: 1mm/2,5mm, z różnokolorowymi zaciskami ślizgowymi	25

## Rozdzielacz z portem bezigłowym CairDrive

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD2000	Rozdzielacz 2-kranikowy, lipidoodporny, 3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20
RCD3000	Rozdzielacz 3-kranikowy, lipidoodporny, 4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20
RCD4000	Rozdzielacz 4-kranikowy, lipidoodporny, 5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20
RCD5000	Rozdzielacz 5-kranikowy, lipidoodporny, 6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20
RCD6000	Rozdzielacz 6-kranikowy, lipidoodporny, 7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20

## Rozdzielacz 2-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż)

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD2305	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	20
RCD2310	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	20
RCD2315	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	20
RCD2320	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	20

### Rozdzielacz 3-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż)

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD3305	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	20
RCD3310	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	20
RCD3315	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	20
RCD3320	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	20

### Rozdzielacz 4-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż)

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD4305	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	10
RCD4310	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	10
RCD4315	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	10
RCD4320	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	10

### Rozdzielacz 5-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż)

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD5305	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	15
RCD5310	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	15
RCD5315	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	15
RCD5320	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	15

### Rozdzielacz 6-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż)

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD6305	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	10
RCD6310	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	10
RCD6315	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	10
RCD6320	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	10

## Rozdzielacz z portem bezigłowym CairDrive oraz imadłem

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD2000A	Rozdzielacz 2-kranikowy, lipidoodporny, 3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20
RCD3000A	Rozdzielacz 3-kranikowy, lipidoodporny, 4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	20
RCD4000A	Rozdzielacz 4-kranikowy, lipidoodporny, 5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	15
RCD5000A	Rozdzielacz 5-kranikowy, lipidoodporny, 6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	15
RCD6000A	Rozdzielacz 6-kranikowy, lipidoodporny, 7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)	15

## Rozdzielacz 2-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) oraz imadłem

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD2305A	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	20
RCD2310A	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	20
RCD2315A	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	20
RCD2320A	Rozdzielacz 2-kranikowy (3 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	20

## Rozdzielacz 3-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) oraz imadłem

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD3305A	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	20
RCD3310A	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	20
RCD3315A	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	20
RCD3320A	Rozdzielacz 3-kranikowy (4 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	20

## Rozdzielacz 4-kranikowy z przedłużaczem PE/PCV (m/ż) oraz imadłem


NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD4305A	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	15
RCD4310A	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	15
RCD4315A	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	15
RCD4320A	Rozdzielacz 4-kranikowy (5 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	15

## Rozdzielacz 5-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) oraz imadłem

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD5305A	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	15
RCD5310A	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	15
RCD5315A	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	15
RCD5320A	Rozdzielacz 5-kranikowy (6 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	15

## Rozdzielacz 6-kranikowy z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) oraz imadłem

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/ op.
RCD6305A	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 50cm	15
RCD6310A	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 100cm	15
RCD6315A	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 150cm	15
RCD6320A	Rozdzielacz 6-kranikowy (7 x CairDrive + 1 x LuerLock (m)), z przedłużeniem PE/PCV (m/ż) 200cm	15

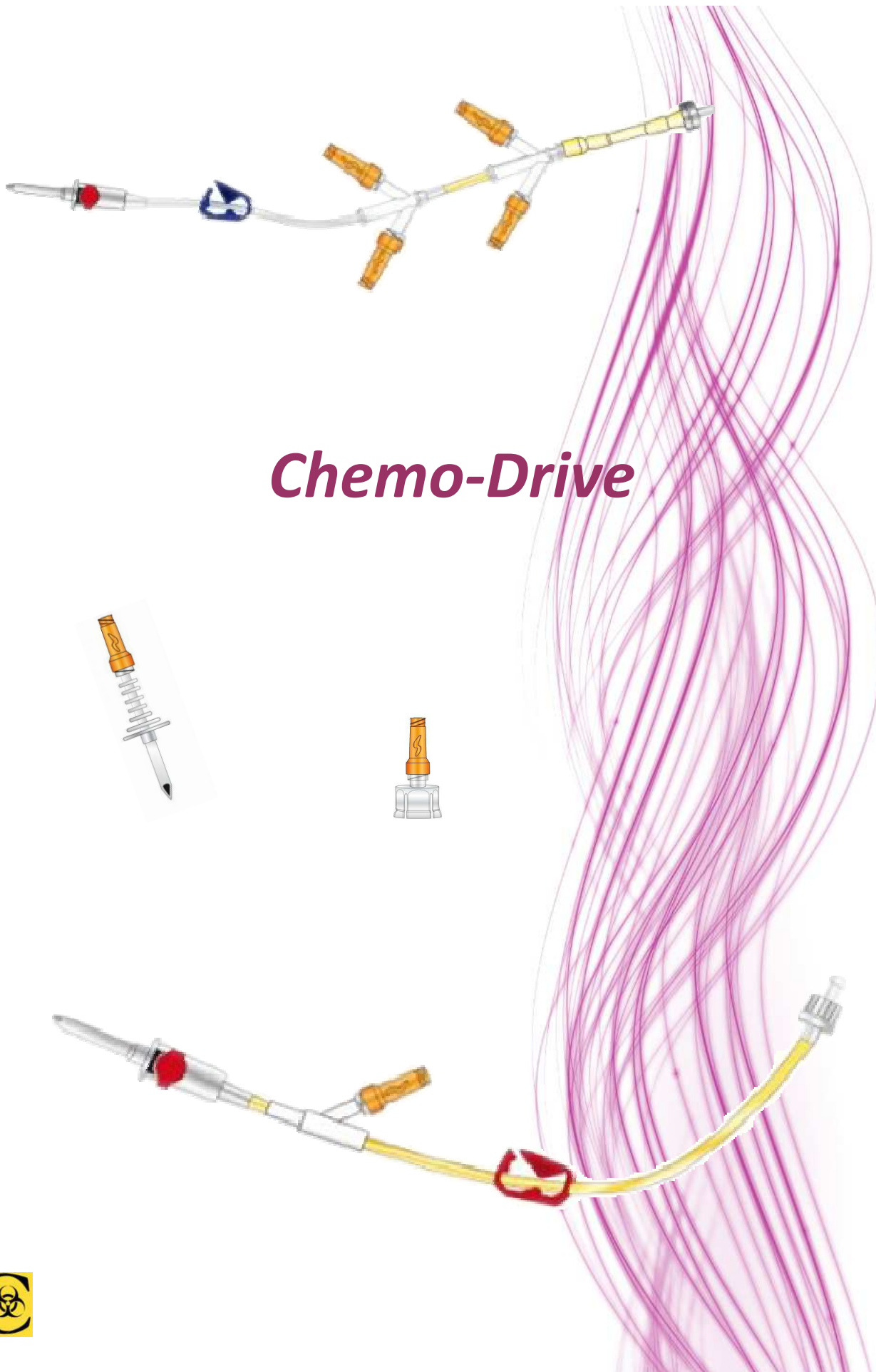

## *Chemo-Drive*



**AKME**

Dystrybutor w Polsce: AKME

Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
Tel.+48 (22) 853-50-69, -70, -72  
[www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

Producent: CAIR LGL

Francja, Zi Le Pontet,  
69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)




## Przyrządy do pobierania/podawania leków

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/op.
EL501	Iglica do pojemników z portem Cair-Drive, bez odpowietrzania	60
EL502	Iglica do pojemników z portem Cair-Drive, z dwoma filtrami odpowietrzającymi	50
EL503	Iglica do fiolek i butelek, rozmiar 14mm, z portem Cair-Drive,	40
EL504	Iglica do fiolek i butelek, rozmiar 20mm, z portem Cair-Drive,	40
EL505	Iglica do worka, z portem Cair-Drive, z filtrem 0,2µm w odpowietrzniku	50
EL506	Iglica do worka, z portem Cair-Drive, z zaworem jednokierunkowym, z filtrem 0,2µm w odpowietrzniku	50
EL487	Iglica do fiolek, MicroSpike, z portem Cair-Drive, bez odpowietrzania	200
EL488	Iglica do fiolek, MiniSpike, z portem Cair-Drive, z filtrem 0,2µm w odpowietrzniku	100



EL487

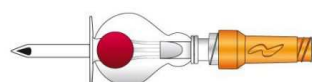

EL505



EL503/EL504



EL501



EL502

## Zestaw do podaży grawitacyjnej

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/op.
CHD444	Zestaw do podaży grawitacyjnej, bursztynowy, 1-drożny (1 x CairDrive)	100
CHD427	Zestaw do podaży grawitacyjnej, bursztynowy, 2-drożny (2 x CairDrive)	75
CHD429	Zestaw do podaży grawitacyjnej, bursztynowy, 3-drożny (3 x CairDrive)	75
CHD431	Zestaw do podaży grawitacyjnej, bursztynowy, 4-drożny (4 x CairDrive)	50
CHD433	Zestaw do podaży grawitacyjnej, bursztynowy, 5-drożny (5 x CairDrive)	50

CHD429






## Linie boczne z zaworem jednokierunkowym

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/op.
<b>CHD439</b>	Linia boczna, bursztynowa, z portem bezigłowym CairDrive, do przygotowywania leków antyblastycznych, z zaworem jednokierunkowym na końcu	100
<b>CHD441</b>	Linia boczna, bursztynowa, z portem bezigłowym CairDrive, do przygotowywania leków antyblastycznych, z filtrem 0,2um (paclitaxel), z zaworem jednokierunkowym na końcu	100



## Zestaw do podaży przy użyciu pompy

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/op.
<b>CHD436</b>	Zestaw do podaży grawitacyjnej lub z pompy, bursztynowy, 2-drożny (2 x CairDrive)	100
<b>CHD438</b>	Zestaw do podaży grawitacyjnej lub z pompy, bursztynowy, 4-drożny (4 x CairDrive)	100
<b>CHD493</b>	Zestaw do podaży grawitacyjnej lub z pompy, 1-drożny (1 x CairDrive)	100

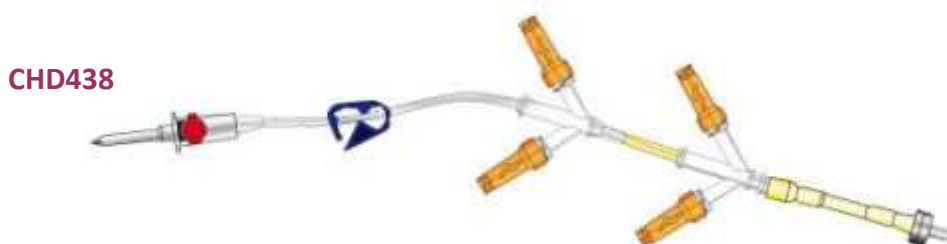

## Linie boczne z łącznikiem LuerLock (M) na końcu

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/op.
<b>CHD504</b>	Linia boczna, bursztynowa, z portem bezigłowym CairDrive, do przygotowywania leków antyblastycznych, z łącznikiem LuerLock (M) na końcu	100
<b>CHD506</b>	Linia boczna, bursztynowa, z portem bezigłowym CairDrive, do przygotowywania leków antyblastycznych, z filtrem 0,2um (paclitaxel), z łącznikiem LuerLock (M) na końcu	100



## Zestaw do podaży z zaworem jednokierunkowym

NR KATALOGOWY	PRODUKT	Ilość/op.
<b>CHD496</b>	Zestaw do podaży grawitacyjnej lub z pompy, bursztynowy, 4-drożny, z zaworami jednokierunkowymi przy odprowadzeniach	100
<b>CHD498</b>	Zestaw do podaży grawitacyjnej lub z pompy, bursztynowy, 2-drożny, z zaworami jednokierunkowymi przy odprowadzeniach	100

CHD496



**AKME**

**Dystrybutor w Polsce: AKME**

Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
Tel.+48 (22) 853-50-69, -70, -72  
[www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

**Producent: CAIR LGL**

Francja, Zi Le Pontet,  
69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)



**AKME**

**Dystrybutor w Polsce: AKME**

Poloneza 89B • 02 – 826 Warszawa  
Tel.+48 (22) 853-50-69, -70, -72  
[www.akme.com.pl](http://www.akme.com.pl)

**Producent: CAIR LGL**

Francja, Zi Le Pontet,  
69380 Civrieux d'Azergues  
[www.cairlgl.com](http://www.cairlgl.com)

